

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper

Afsnittet om Fleksible endoskoper henvender sig til personale som anvender alle former for endoskoper i deres daglige arbejde. Ligeledes er afsnittet tænkt til den eller de der har opgaver i forbindelse med genbehandling og klargøring af fleksible endoskoper ligesom personale som indkøber eller transporterer endoskoperne kan hente viden i afsnittet.

I menuen "**Værktøjskassen**" kapitel 1 finder du "**Kom godt i gang med genbehandling**" som indeholder følgende generelle informationer:

- Indledning
- Hvordan får man størst udbytte?
- Brug af brugerkode
- Brug af menuer og undermenuer
- Opslagsværk - Søgefunktion
- Fortrydeknop/Returtast
- Brug af oversigten
- Brug af Lærebogen generelt
- Brug af Træningsskemaer
- Brug af ordbog
- Brug af Legepladsen
- Ledelseevaluering
- Værktøjskassen

I denne vejledning "kom godt i gang, fleksible endoskoper" behandles følgende emner:

LÆREBOG: FLEKSIBLE ENDOSKOPER.....	2
LEGEPLADS.....	2
TRÆNINGSSKEMA.....	4

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper

Lærebog: Flexible endoskoper

Log på med brugernavn og brugerkode, (se kapitel 1) vælg emnet "Flexible endoskoper", punkt 4 og klik på dette og følgende billede fremkommer:



Ved klik i menuen på "Lærebog" fremkommer en række undermenuer. Klik på den ønskede undermenu eller læs kapitlerne i kronologisk rækkefølge.



Legeplads

I afsnittet om Flexible endoskoper findes 2 niveauer på "Legepladsen"

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper

[Lærebog](#)

[Legeplads](#), testspørgsmål

[Ledelsesdel](#), evalueringstest

[Træningsskema](#)

4. Fleksible endoskoper, legeplads

[Grundlæggende niveau](#)

[Videregående niveau](#)

Menu billedet giver adgang til testspørgsmål på begge niveauer. Klikker man på *Grundlæggende niveau* fremkommer 4 tests, se billede:

Testspørgsmål til grundlæggende niveau

[29. Det fleksible endoskop](#)

[30. Forrengøring og manuel rengøring af fleksible endoskoper](#)

[31. Mekanisk rengøring og kemisk desinfektion af fleksible endoskoper](#)

[32. Håndtering, opbevaring og sterilisering af fleksible endoskoper](#)

Klikker man derimod på *Videregående niveau* ser billedet se således ud:

Testspørgsmål til videregående niveau

[119. Det fleksible endoskop](#)

[120. Tørre- og opbevaringsskabe](#)

Hver Legepladstest indledes med en kort beskrivelse af indhold:

31. Mekanisk rengøring og kemisk desinfektion af fleksible endoskoper

Denne test handler om forholdsregler ved mekanisk rengøring og kemisk desinfektion af fleksible endoskoper.

Lær mere delen giver korte svar. For yderligere teori henvises til lærebogen, afsnit [4.5](#)

God fornøjelse med testen!

Link til
lærebogsafsnit

Når man har gennemgået og besvaret spørgsmålene i legepladstestene klikker man på knappen: Vis testresultat
Den ser sådan ud:

Vis Testresultat

Straks efter ses svaret. Det er forventeligt at vidensniveauet genererer et resultat på 80 %.

Du fik: 10 korrekt, ud af 10

Din score var: 100%

Tillykke, du bestod!

Du fik: 7 korrekt, ud af 10

Din score var: 70%

Nu kender du din "lær mere" opgave

Når man selv eller sammen med en kollega gennemgår testen findes der ved hvert af de mange testspørgsmål en *Lær mere* del, som man kan klikke på. Se billeder nedenfor.

Spørgsmål:

Alle kanaler skal tilsluttes konnekterslanger for at sikre, at der sker en korrekt rengøring og desinfektion i endoskopets kanaler. Hvordan finder man ud af om det er gjort?

Svaret er korrekt!

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper

Lær mere



Klikker man her på *Lær mere* knappen fremkommer en lille tekst med forklaring. Der er *Lær mere* til alle testspørgsmål uanset om besvarelsen er korrekt eller ej.

Se nedstående eksempel:

Spørgsmål:

Alle kanaler skal tilsluttes konnekterslanger for at sikre, at der sker en korrekt rengøring og desinfektion i endoskopets kanaler. Hvordan finder man ud af om det er gjort?

Svaret er korrekt!

Rigtigt svar:

Maskinen overvåger at der er det korrekte vandtryk i hver kanal flere gange i løbet af rengørings- og desinfektionsprocessen og melder fejl hvis der ikke er vandtryk i kanalerne

Lær mere:

Endoskopvaskemaskiner, der er fremstillet efter DS/EN ISO 15 883-1 og -4, er forsynet med et måleudstyr, der løbende måler vandtrykket i alle kanaler og giver en fejllarm, såfremt trykket ikke er stort nok.

Legepladsen er, heller ikke i dette afsnit, stedet man øger sin viden, det er der, den trænes. *Træningstestene* er kun et lille udpluk af lærebogens teoretiske indhold.

Det kan Lærebogen bruges til.

Husk det er ikke målet i sig selv at opnå de 80 % på *Legepladsen*, derfor **Lær mere** delen.

Træningsskema

Brug træningsskema til at skabe overblik, se udklip herfra:

4. Fleksible endoskoper, lærebog	Læst dato	Testspørgsmål, grundlæggende niveau	Test taget dato	Testspørgsmål, videregående niveau	Test taget dato
4.1 Det fleksible endoskops opbygning		29. Det fleksible endoskop		119. Det fleksible endoskop	
4.2 Typer af fleksible endoskoper og deres anvendelsesområde		30. Forrengøring og manuel rengøring af fleksible endoskoper		120. Tørre- og opbevaringsskabe	
4.3 Referencegrundlag for genbehandling af fleksible endoskoper		31. Mekanisk rengøring og kemisk desinfektion af fleksible endoskoper			
4.4 Særlige forhold ved genbehandling af fleksible endoskoper		32. Håndtering, opbevaring og sterilisering af fleksible endoskoper			
4.5 Genbehandling af fleksible endoskoper					
4.6 Endoskopvaskemaskiner					

God fornøjelse med brug af programmet!

Hilsen Do-Best forfatterne!